

ДОРОЖНІ КРІСЛА КОЛІСНІ (АКТИВНІ) БАЗОВІ

Засіб для самостійного пересування користувача на вулиці за допомогою мускульної сили, що прикладається до важелів або інших деталей механічного приводу. Зазвичай характеризується відсутністю можливості в індивідуальній адаптації системи сидіння, може бути оснащено регульованими частинами (підніжками, підлокітниками, спинкою, підголівником), які дають змогу адаптувати положення тіла та забезпечують комфорт при тривалому використанні

Код ISO 9999: 12 21 12, 12 21 18

Код ДКПП: 30.92.20-90.03, 30.92.20-90.07

Код УКТЗЕД: 87 13 90

ОБОВ'ЯЗКОВІ ФУНКЦІЇ:

- керування самостійне приводними важелями;
- система опори тіла пружинна, регульована за кутом нахилу;
- підніжка регулюється за висотою, з відкидною опорою стопи;
- підлокітники знімні та відкидні;
- спинка регулюється по горизонталі.

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ОСНАЩЕННЯ:

- подушки на сидіння та спинку;
- суцільна підставка під гомілки;
- протиперекидний пристрій;
- робоче гальмо.

ДОРОЖНІ КРІСЛА КОЛІСНІ (АКТИВНІ) БАЗОВІ

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Травма, захворювання хребта або інший тип ураження нервової системи, що супроводжується парезом чи паралічем однієї або двох нижніх кінцівок;
- Травма, захворювання таза або нижніх кінцівок (у тому числі виражені залишкові деформації), що унеможлиблює самостійне пересування без додаткової опори;
- Загальні захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, опорно-рухового апарату (інших систем та органів на стадіях компенсації) та виражені наслідки перенесених хвороб, що унеможлиблюють самостійне пересування без додаткової опори;
- Наслідки оперативних втручань, травм нижніх кінцівок і поясу нижніх кінцівок крім дистального відділу однієї стопи), такі як ампутаційні кукси (в тому числі обох кінцівок), хибний суглоб, дефект сегмента;
- Користувач може самостійно керувати кріслом колісним за допомогою однієї або обох верхніх кінцівок;
- Користувач самостійно переміщується та долає перешкоди або може скористатись для цього допомогою супроводжуючої особи;
- Користувач самостійно може сидіти на кріслі без додаткових елементів підтримки.

МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ:

абсолютні:

- суттєве обмеження рухів обох верхніх кінцівок (можуть бути обумовлені парезами, паралічами, наслідками оперативних втручань і травм);
- захворювання серцево-судинної, легеневої системи на стадії декомпенсації, що унеможлиблює самостійне переміщення в кріслі колісному;
- порушення свідомості, виражені порушення поведінки, деменція;
- наслідки травм, операцій і загальних захворювань, що потребують фіксації поясу верхніх кінцівок та шиї (голови);
- психічні захворювання;
- порушення свідомості, виражені порушення поведінки, деменція;
- епілепсія та інші органічні ураження центральної нервової системи чи наслідки травм, що супроводжуються значним порушенням координації рухів верхніх кінцівок;
- виражені порушення статичності та координації рухів;
- значні порушення зору;
- вік користувача не більше 70 років (для дорожніх крісел колісних активних).

ДОРОЖНЄ КРІСЛО КОЛІСНЕ (АКТИВНЕ)
БАЗОВЕ

08.2



Виробник:
ТОВ «Друкмаш-центр»

Шифр та модель виробу:
КК.4.2.2-0-2-8-5-7-5-10-2.4-3.7-5.6.9.14.17.18-
1.6-3.4-7A
(42 см)
(модель ДККА «Marusia-1»)

Конструктивні
особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не
втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння фіксоване
Підлокітники короткі, відкидні
Підніжка - з відкидною складаною опорою стопи,
регулюється висота
Система опори тіла – регульована за кутом нахилу,
пружинна
Спинка – відкидна, регулюється по горизонталі
Для активний пацієнтів

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій (у вигляді колеса)
Робоче гальмо

Технічні характеристики

765	420	400-440	620	300	610	825	100 (kg)	38,8

ДОРОЖНЄ КРІСЛО КОЛІСНЕ (АКТИВНЕ)
БАЗОВЕ

08.2



Виробник:
ТОВ «Друкмаш-центр»

Шифр та модель виробу:
КК.4.2.2-0-2-8-5-7-5-10-2.4-3.7-5.6.9.14.17.18-1.6-3.4-7A
(42 см)
(модель ДККА «Marusia-2»)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні, підніжка регулюється вручну
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння фіксоване
Підлокітники короткі, відкидні
Підніжка - з відкидними складовими опорами стопи, регулюється висота
Система опори тіла – регулюється за кутом нахилу, пружинна
Спинка – відкидна, регулюється по горизонталі

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Суцільна підставка під гомілки
Запобіжний пояс
Протиперекидний пристрій (у вигляді колеса)
Робоче гальмо

Технічні характеристики

755	420	400-440	510	300	520	940	100 (kg)	37,8